


Nach der Punktion der Vene und Einführung des Seldinger Drahtes ist eine **Stichinzision** im Bereich der Punktionsstelle sinnvoll.

WICHTIG!

Ausreichend und mehrfach **vordilatieren** - bis in das Gefäß!

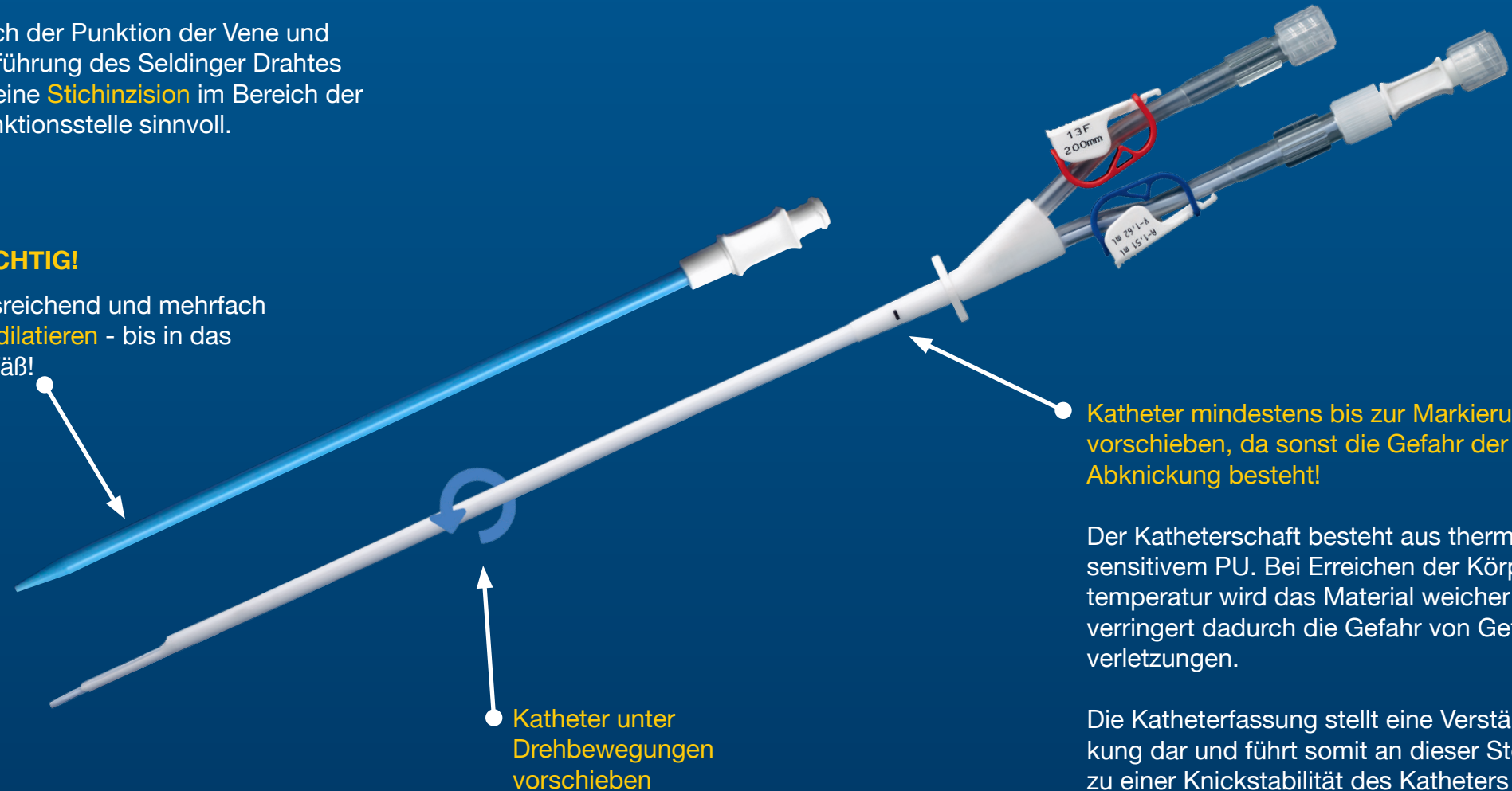

Katheter mindestens bis zur Markierung vorschieben, da sonst die Gefahr der Abknickung besteht!

Der Katheterschaft besteht aus thermo-sensitivem PU. Bei Erreichen der Körpertemperatur wird das Material weicher und verringert dadurch die Gefahr von Gefäßverletzungen.

Die Katheterfassung stellt eine Verstärkung dar und führt somit an dieser Stelle zu einer Knickstabilität des Katheters