

Hinweise zur Legetechnik eines
HIGHFLOW DREILUMEN-DIALYSEKATHETERS
mit endständigen Öffnungen


Achim Schulz-Lauterbach
Vertrieb medizinischer Produkte GmbH

VMP

Nach der Punktion der Vene und
Einführung des Seldinger Drahtes
ist eine **Stichinzision** im Bereich der
Punktionsstelle sinnvoll.

WICHTIG!

Ausreichend und mehrfach
vordilatieren - bis in das
Gefäß!

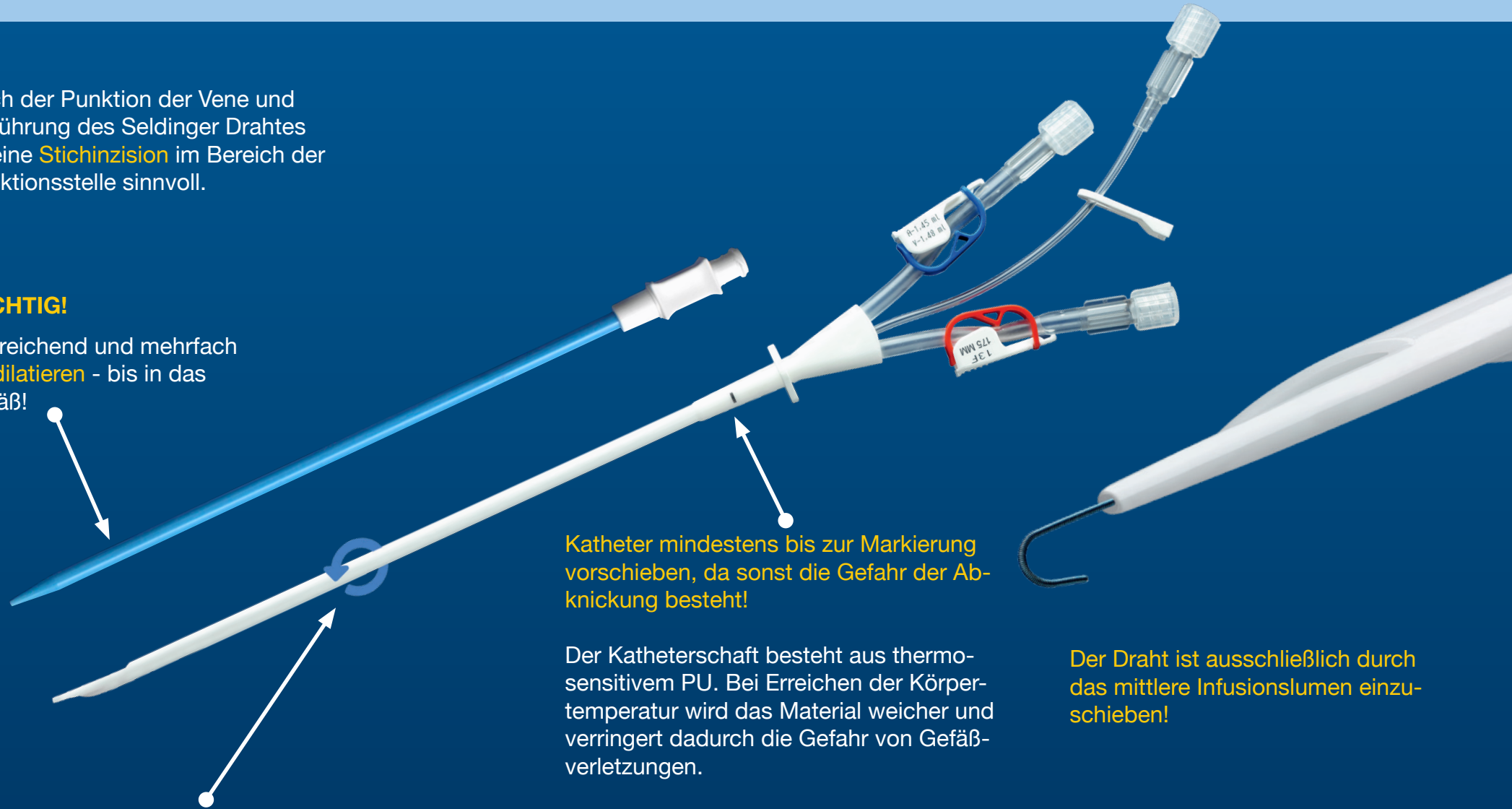

**Katheter unter
Drehbewegungen
vorschieben**

**Katheter mindestens bis zur Markierung
vorschieben, da sonst die Gefahr der Ab-
knickung besteht!**

Der Katheterschaft besteht aus thermo-
sensitivem PU. Bei Erreichen der Körper-
temperatur wird das Material weicher und
verringert dadurch die Gefahr von Gefäß-
verletzungen.

Die Katheterfassung stellt eine Verstär-
kung dar und führt somit an dieser Stelle
zu einer Knickstabilität des Katheters

**Der Draht ist ausschließlich durch
das mittlere Infusionslumen einzu-
schieben!**

Hergestellt in Deutschland
von Joline GmbH & Co. KG
Stand: 03-2019

Joline