

Mit Sicherheit gut. Actester



Achim Schulz-Lauterbach
Vertrieb medizinischer Produkte GmbH

VIMIP

Langer Brauck 15 • D-58640 Iserlohn • Telefon +49 2371 9763-0 • Telefax +49 2371 44919
Achim Schulz-Lauterbach • Vertrieb medizinischer Produkte Ges.m.b.H. • A-1180 Wien • Theresiengasse 11 • Tel. +43 1 4030858-0 • Fax: +43 1 4030858-18

Actester

Gute Gründe, sich für das Actester System zu entscheiden!

Der Actester und die zugehörigen Röhrchen ermöglichen eine akkurate, zuverlässige, preiswerte und automatisierte Bestimmung der Gerinnungszeit.

Das Actester/Actest System bietet mehr Sicherheit für ihren Patienten und wird als geeignete Methode anerkannt.

KLEINSTE BLUTUNGEN: eine wichtige Erwägung, besonders bei Patienten mit einem niedrigen Hämatokrit.

GENAUE, REPRODUZIERBARE ERGEBNISSE: im Gegensatz zu konventionellen Gerinnungsbestimmungsmethoden, welche entweder von der Genauigkeit der Handhabung oder der Beobachtung des Gerinnungsprozesses abhängen, ist die Actest-Methode automatisiert. Analog- und Digitalcomputertechnik kontrollieren gemeinsam alle Funktionen, wie Einschalten, Zeit- und Temperaturkontrolle sowie den Ablauf des Gerinnungsprozesses.

Nach Beendigung der Gerinnungsbestimmung ertönt ein Signal, und die Gerinnungszeit wird von dem Gerät angezeigt.

Das Teströhrchen kann während der Gerinnungsbestimmung entnommen werden, ohne daß die Zeitbestimmung unterbrochen wird.

WENIGER ZEITAUFWAND: weniger Zeit pro Gerinnungsbestimmung bedeutet schneller verfügbare Resultate und mehr Zeit für den Patienten.

EINFACHE HANDHABUNG: der Actester ist ein Gerät mit Einknopf-Bedienung und einer einfachen Handhabung zur Gerinnungsbestimmung; die Bedienung ist leicht und einfach durchzuführen.

BATTERIE ODER NETZBETRIEB: der eingebaute Akku ermöglicht den Betrieb des Gerätes direkt am Bett des Patienten. Dies sichert die Betriebsbereitschaft des Actesters zu jeder Zeit. Sollte die Anzeige "LOW BATT" auf dem Anzeigenfeld des Gerätes aufleuchten, muß der Akku aufgeladen werden. Hierzu ist das Gerät auszuschalten.

EINGEBAUTER HEIZBLOCK: die Anzeige "ready" leuchtet auf, wenn der Heizblock die richtige Betriebstemperatur erreicht hat.

BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT: elektronische Bausteine nach dem neuesten Stand der Technik stellen störungsfreies Arbeiten sicher. Das Gerät ist leicht zu reinigen und zu warten. Wir gewährleisten zuverlässigen Kundendienst und Garantie.

GERINGE BETRIEBSKOSTEN: spürbare Einsparungen durch weniger Heparinverbrauch.

Bestellinformation

VPE

Art.-Nr.	Beschreibung	
AC-T	Testgerät für aktivierte Gerinnungszeit inkl. Netzteil/Ladegerät	1 Stück
T-1001	Teströhrchen	50 Stück

6-2001/13