

Nach der Punktion der Vene und
Einführung des Seldinger Drahtes
ist eine **Stichinzision** im Bereich der
Punktionsstelle sinnvoll.

WICHTIG!

Ausreichend vordilatieren!

Katheter mindestens bis zur Markierung
vorschieben, da sonst die Gefahr der
Abknickung besteht!

Der Katheterschaft besteht aus thermo-
sensitivem PU.
Bei Erreichen der Körpertemperatur wird
das Material weicher und verringert
dadurch die Gefahr von Gefäßverletzungen.

Die Katheterfassung stellt eine Verstärkung
dar und führt somit an dieser Stelle zu einer
Knickstabilität des Katheters

der Katheter sollte unter
„sanfter“ Drehbewegung
vorgeschieben werden