


Nach der Punktion der Vene und
Einführung des Seldinger Drahtes
ist eine **Stichinzision** im Bereich der
Punktionsstelle sinnvoll.

WICHTIG!

Ausreichend vordilatieren!

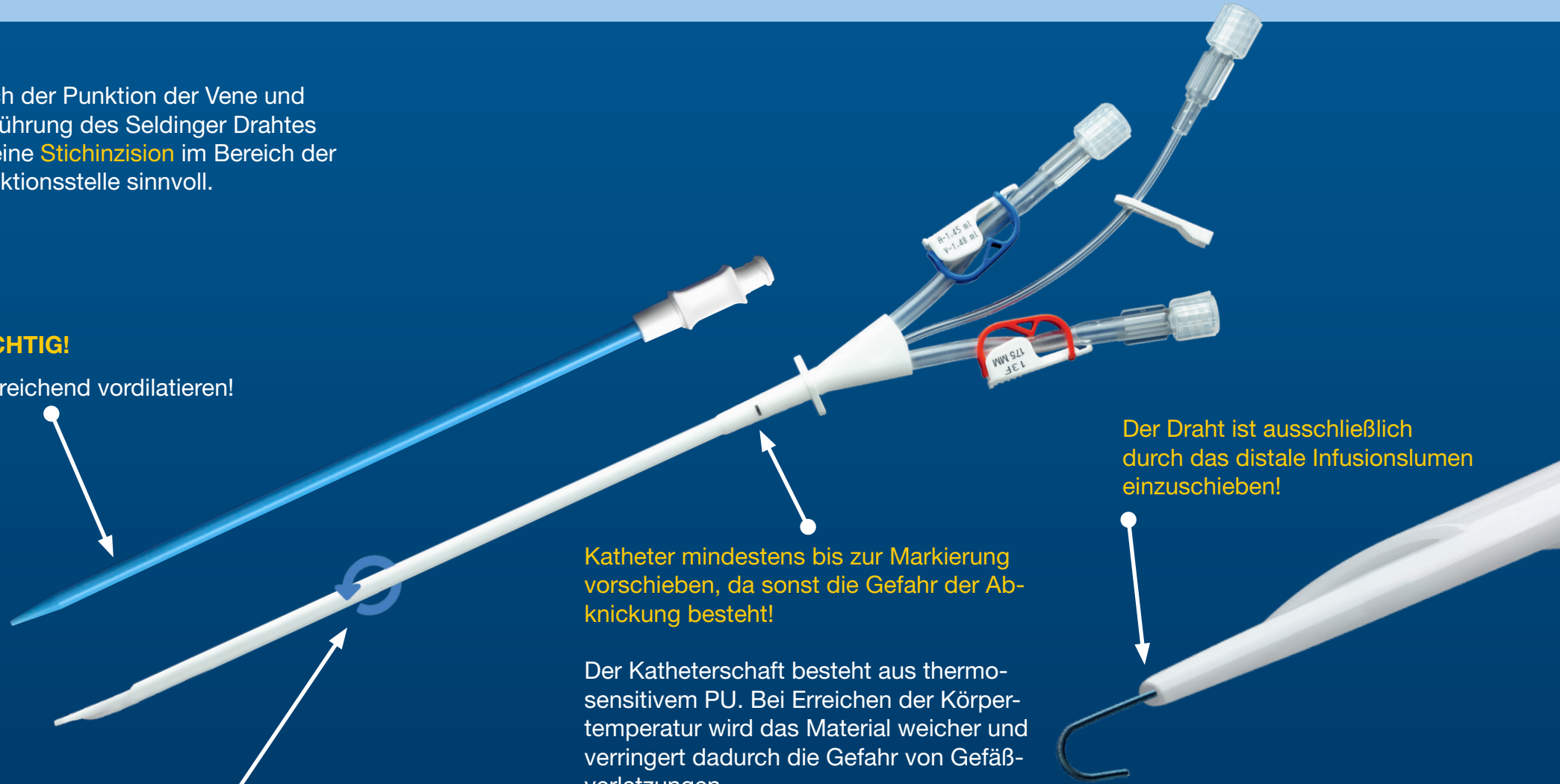

Der Draht ist ausschließlich
durch das distale Infusionslumen
einzuschieben!

Katheter mindestens bis zur Markierung
vorschieben, da sonst die Gefahr der Ab-
knickung besteht!

Der Katheterschaft besteht aus thermo-
sensitivem PU. Bei Erreichen der Körper-
temperatur wird das Material weicher und
verringert dadurch die Gefahr von Gefäß-
verletzungen.

Die Katheterfassung stellt eine Verstär-
kung dar und führt somit an dieser Stelle
zu einer Knickstabilität des Katheters

der Katheter sollte unter
„sanfter“ Drehbewegung
vorgeschoben werden