

Hinweise zur Legetechnik eines  
**Highflow Dialyse-Katheters**  
mit Shotgun-Design / endständigen Öffnungen

**Joline®**

**Achim Schulz-Lauterbach**

Vertrieb medizinischer Produkte GmbH

*Experts in Care.*

Nach der Punktion der Vene und Einführung des Seldinger Drahtes ist eine Stichinzision im Bereich der Punktionsstelle sinnvoll.

**WICHTIG!**  
Ausreichend vordilatieren!

**Katheter mindestens bis zur Markierung vorschieben, da sonst die Gefahr der Abknickung besteht!**

Der Katheterschaft besteht aus thermo-sensitivem PU. Bei Erreichen der Körpertemperatur wird das Material weicher und verringert dadurch die Gefahr von Gefäßverletzungen.

Die Katheterfassung stellt eine Verstärkung dar und führt somit an dieser Stelle zu einer Knickstabilität des Katheters.

Der Katheter sollte unter „sanfter“ Drehbewegung vorgeschoben werden