

Hinweise zur Legetechnik eines Highflow Dreilumen-Dialyse-Katheters mit endständigen Öffnungen

Nach der Punktion der Vene und Einführung des Seldinger Drahtes ist eine Stichinzision im Bereich der Punktionsstelle sinnvoll.

WICHTIG!
Ausreichend vordilatieren!



Der Katheter sollte unter „sanfter“ Drehbewegung vorgeschoben werden

Katheter mindestens bis zur Markierung vorschieben, da sonst die Gefahr der Abknickung besteht!

Der Katheterschaft besteht aus thermosensitivem PU. Bei Erreichen der Körpertemperatur wird das Material weicher und verringert dadurch die Gefahr von Gefäßverletzungen.

Die Katheterfassung stellt eine Verstärkung dar und führt somit an dieser Stelle zu einer Knickstabilität des Katheters

Der Draht ist ausschließlich durch das distale Infusionslumen einzuschieben!

